

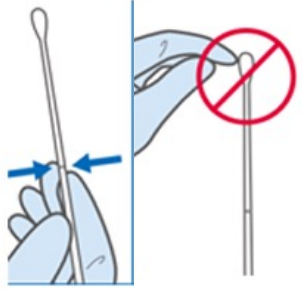




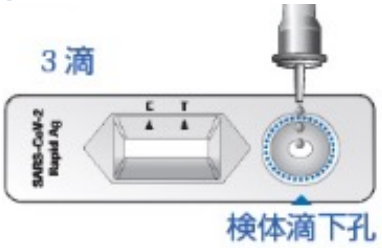
# 抗原検査採取方法のご案内

※検査の前に手を清潔にしてください。

## 用意するもの

<p>①</p>  <p>開封後</p> <p>鼻腔ぬぐい液採取用 滅菌スワブ（綿棒）</p>	<p>②</p>  <p>抽出用バッファーチューブ</p>	<p>③</p>  <p>ノズルキャップ</p>	<p>④</p>  <p>開封後</p> <p>テストデバイス</p>
--	--	--	--

## 検体採取

<p>①</p>  <p>綿棒をパッケージから開封し、下の部分を持ちてください。綿球部分には手を触れないでください。</p>	<p>②</p>  <p>鼻の穴から約2cmのところまで綿棒を挿入し、内壁に沿わせて5回程度回転させ、5秒ほどそのままにして湿らせます。逆の鼻の穴も同様に採取し、綿棒が十分に湿っていることを確認します。</p>	<p>③</p>  <p>採取した綿棒をチューブに入れ、チューブの側面から綿棒の先端をつまみ、10回以上左右に回転させ、上下に動かしてもみほぐします。</p>
<p>④</p>  <p>チューブ側面から綿部分をつまみ、試料を絞り出すように綿棒を引き抜きます。</p>	<p>⑤</p>  <p>ノズルキャップをしっかりと閉めてください。</p>	<p>⑥</p>  <p>3滴</p> <p>検体滴下孔</p> <p>チューブから試料を3滴をテストデバイスの検体滴下孔に真上垂直から滴下して下さい。その後、テストデバイスはスタッフにお渡しください。</p>

※完了しましたらスタッフにお声掛けください。